

Clearblue PLUS دقة تصل إلى أكثر من 99% بدءاً من اليوم المقرر لبداية نزول الطمث. Clearblue PLUS يمكن استخدامه قبل بدء نزول الطمث بـ 4 أيام.

الرجاء قراءة هذه النشرة بعناية قبل إجراء اختبار.

قبل البدء
قد تجدنين من المفيد أن يكون معك ساعة/منبه عند إجراء الاختبار.

1 إجراء الاختبار
إذا كان إجراء الاختبار بدءاً من اليوم المقرر لبداية نزول الطمث، فممكنك الاختبار في أي وقت من اليوم.
• عندما تكونين جاهزة للاختبار، انزع عصى الاختبار من الغلاف المعدني وانزع الغطاء الأزرق. استخدم عصى الاختبار على الفور.

اختبر البول
يمكنك الاختبار مباشرة في مجرى البول، أو في عينة من البول يتم جمعها في وعاء نظيف وجاف.

• أمسكي طرف تغيير الألوان متجهاً للأسفل في مجرى البول، أو في عينة البول المجمعة، وفق ما هو مبين، طوال الخمس ثواني كاملة.



• يتحول طرف تغيير الألوان على الفور إلى اللون القرمزي مشيراً إلى أنه جاري امتصاص البول. يجب الاستمرار في إمساك طرف تغيير الألوان في البول طوال الخمس ثواني كاملة.



5 ثوان
ابدئي توقيت 5 ثوان بمجرد أن ترين طرف تغيير الألوان يتحول إلى اللون القرمزي.
• يجب الاستمرار في إمساك طرف تغيير الألوان في البول طوال الخمس ثواني كاملة.
• تدفق البول أو عينة مجمعة

• أبقِي على طرف تغيير الألوان في الاتجاه الأسفل أو ضعي عصى الاختبار مسطحة حتى تكوني جاهزة لقراءة النتيجة وسيظهر خط أزرق في نافذة التحكم.
• قد ترعين في استبدال الغطاء.

راجعي السؤال 7 عند تحول طرف تغيير الألوان إلى اللون القرمزي على نحو تام.

3 دقائق
انتظري 3 دقائق. عند بدء الاختبار في العمل، سترين خطوطاً زرقاء تبدأ في التحميص.

3 قراءة نتيجتك بعد 3 دقائق
• يمكنك الآن قراءة نتيجتك في نافذة النتائج.
• يجب وجود خط أزرق في نافذة التحكم عند قراءة النتيجة. يشير هذا الخط إلى إتمام عمل الاختبار.
• عند عدم ظهور أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من الاختبار لم يقل (راجعي السؤال 8).

ليس من المهم أن يكون أحد الخطين الذين يشكلان الرمز "+" افتح أو اعش من الآخر؛ فالنتيجة هي "حامل".

مهم!
اقربي نتيجتك خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار. وتجاهلي أي تغييرات في النتيجة بعد هذا الوقت.
إذا ما زلت غير متأكد من نتيجتك، فراجعي السؤال 9 لمعرفة التفاصيل الكاملة.

• لا تؤثر أدوية الصويا الأخرى (مثل الكولوميفين سترات) والمسكنات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) على النتيجة.
• إذا كنت قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقار هرموني لمنع الحمل أو إذا كنت تستخدمين أدوية للحصوية مثل الكولوميفين سترات، فقد تكون دورة الطمث لديك غير منتظمة، مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.
• إذا كنت حاملاً مؤخراً (حتى لو لم يستمر الحمل لمدة كاملة) فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.
• يمكن أن يؤدي الحمل خارج الرحم والتكيس في المبايض وانقطاع الطمث وبعض الحالات المسببة للحادة جداً إلى نتائج مضللة.
• إذا كانت النتيجة "حامل"، فمن الممكن أن تجدي في مرحلة تالية أنك غير حامل بسبب فقدان الطبيعي للحمل الذي يمكن أن يحدث في المراحل المبكرة.
• إذا حصلت على نتائج غير متوقعة، فتبعين مناقشتها مع طبيبك.
نقد استخدمت اختبار الحمل ولكن لم يتحول طرف تغيير الألوان إلى اللون القرمزي على نحو تام. ما الذي يتعين علي فعله؟

عند عدم تحول طرف تغيير الألوان إلى اللون القرمزي على نحو تام، فمن الممكن أنك لم تستخدمي كمية كافية من البول. ومع ذلك، عند ظهور الخط الأزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، عندها يكون الاختبار قد تم. عند عدم ظهور أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، راجعي السؤال 8.

نقد استخدمت اختبار الحمل ولكن لم يظهر أي خط أزرق في نافذة التحكم. ما الذي يتعين علي فعله؟
عند عدم وجود أي خط أزرق في نافذة التحكم خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار، فإن الاختبار لم يتم. وقد يرجع ذلك إلى:
• عدم الإبقاء على طرف تغيير الألوان في الاتجاه الأسفل أو عدم وضع عصى الاختبار مسطحة على وجه البول.
• استخدام كمية كبيرة جداً أو صغيرة جداً من البول. يتعين عليك جمع عينات لمدة 5 ثوان.

يتعين عليك إجراء الاختبار مرة أخرى، باستخدام عصى اختبار جديدة، مع مراعاة اتباع التعليمات. قد ترعين في جمع عينة من بولك في وعاء نظيف وجاف وتغميرين طرف تغيير الألوان فقط لمدة 5 ثوان.

ماذا يحدث إذا ما كنت غير متأكد من النتيجة؟
• للتأكد من أن نتيجة اختبارك هي "حامل"، يجب أن يكون هناك خط أزرق في نافذة التحكم وزرر "+" في نافذة النتائج خلال 10 دقائق من إجراء الاختبار.
• قد يختلف مظهر الرمز "+" في نافذة النتائج، ولكن يتعين أن يكون الخطان اللذان يشكلان الرمز "+" والخط في نافذة التحكم ذوي عرض مشابه (انظر الصور من A إلى C).

لا تستخدمي الجهاز للاستخدام المنزلي. يحفظ في درجة حرارة الغرفة. يسمح بالوصول إلى درجة حرارة الغرفة لمدة 30 دقيقة قبل إجراء الاختبار حالة حفظه في الثلاجة. يحفظ بعيداً عن متناول الأطفال. للاستخدام التشخيصي في المختبر فقط. يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية العادية. تجديي الاستخدام إذا كان الغلاف المعدني الرقيق ناعماً. لا تستخدم عصى اختبار انتهت صلاحية استخدامها. عصى الاختبار الواحدة للاستخدام مرة واحدة فقط.

لاستقراءات حول المنتج، رجاء اتصل بـ "بدمع العملاء" في العنوان أدناه. لمعرفة الخطوات اللاحقة ومعلومات وإرشادات عامة بخصوص أمور الحمل، الرجاء زيارة موقعنا على الإنترنت: www.clearblue.com

IVD	جهاز طبي للتشخيص في	كود الترخيص	غير قابل لإعادة الاستخدام
CE	مقبول درجة الحرارة 2 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية	لـ IVD	لـ IVD
CE	مقبول درجة الحرارة 2 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية	لـ IVD	لـ IVD

© 2016 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. جميع الحقوق محفوظة Clearblue علامة تجارية.

أسئلة وأجوبة – الرجاء قراءة القسم أدناه، الذي يجيب عن الأسئلة المعتادة.

أسئلة وإجابات

1 ما مدى دقة Clearblue PLUS؟
Clearblue PLUS دقة تصل إلى أكثر من 99% في الاختبارات العملية، عند استخدامها بدءاً من اليوم المقرر لنزول الطمث

2 كيف يعمل Clearblue PLUS؟
عندما تصبحين حاملاً، ينتج جسمك هرمون الحمل hCG (موجبة الغدد التناسلية المشيمائية البشرية). تزيد كمية hCG في جسمك في المراحل المبكرة من الحمل. ويمكن لاختبار الحمل Clearblue PLUS اكتشاف الكميات الصغيرة من هذا الهرمون في البول. (تصل حساسية هذا الاختبار إلى 25 مليون وحدة دولية/مل).

3 متى يمكنني إجراء الاختبار باستخدام Clearblue PLUS؟
يمكن استخدام Clearblue PLUS قبل بدء نزول الطمث بأربعة أيام. إذا أجريت الاختبار قبل بدء نزول الطمث وحصلت على النتيجة "لا يوجد حمل"، فلا تزال هناك فرصة في أن تكوني حاملاً. انتظري المخطط أدناه لمعرفة نتائج الاختبار السريري Clearblue PLUS باستخدام عينات الحمل في مراحله المبكرة.

4 الاختبار المبكر
يوصي Clearblue PLUS بأن تجري الاختبار بدءاً من اليوم المقرر لبداية نزول الطمث. ولكن يزيد معدل الحمل بسرعة في المراحل المبكرة من الحمل ويمكن استخدام Clearblue PLUS مع البول في الاختبار قبل نزول الطمث بأربعة أيام. في الاختبار السريري باستخدام عينات الحمل في مراحله المبكرة، يعطي Clearblue PLUS النتائج التالية:

عدد الأيام قبل الموعد المقرر لنزول الطمث	النسبة المئوية للعينات من السيدات الحوامل التي أعطت النتيجة "حامل"
-1	98 %
-2	97 %
-3	88 %
-4	56 %

5 هل اضطر لاستخدام عينة بول في الصباح الباكر؟
عند إجراء الاختبار قبل نزول الطمث، توصيك بالاختبار ببول أول النهار. وإلا فممكنك الاختبار في أي وقت من اليوم. تجنبي الإفراط في تناول السوائل قبل إجراء الاختبار.

6 ليست متأكد من الموعد التالي المقرر لنزول الطمث. كيف أعرف أنني أجري الاختبار في الوقت المناسب؟
لحساب اليوم المقرر لنزول الطمث، احسبي طول الدورة الطبيعية بحسب عدد الأيام بدءاً من اليوم الأول لنزول الطمث حتى اليوم السابق لبداية نزول الطمث التالي. إذا كانت الدورات لديك غير منتظمة، فراجعي أطول دورة في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.

7 إذا كان ليس لديك فكرة عن الموعد المقرر لنزول الطمث، ففومي بإجراء الاختبار بعد آخر مرة مارست فيه الجنس بدون وقاية بما لا يقل عن 19 يوماً.
• إذا كانت النتيجة "لا يوجد حمل"، وما زال لديك شك في وجود حمل، فراجعي السؤال 13.

8 هل يمكن أن يؤثر أي دواء أو ظروف صحية على النتيجة؟
اقربي دائماً تعليمات الحزمة المصنعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء اختبار. • يمكن أن تؤدي عقاقير الحصوية التي تحتوي على هرمون hCG إلى نتائج مضللة (عادة ما يتم تناول عقاقير الحصوية هذه عن طريق الحقن وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من تناولها إلى إعطاء نتيجة "حامل" زائفة).