

1 كيف يعمل الاختبار



عندما تكونين حاملاً ينتج الجسم هرمون الحمل (HCG هرمون مشيمي بشري محفز للتناسل). وتزداد كمية HCG في جسدك خلال المراحل المبكرة من الحمل. ويمكن لاختبار الحمل Clearblue COMPACT اكتشاف الكميات الصغيرة لهذا الهرمون في وقت مبكر من اليوم المقرر لبداية نزول الطمث. ويمكن استخدام Clearblue COMPACT في أي وقت من اليوم وتوفير نتائج موثوق بها. وتصل دقة Clearblue COMPACT إلى أكثر من 99% عند الاستخدام من اليوم المقرر لبداية نزول الطمث.

2 إجراء الاختبار

- عندما تكونين مستعدة لإجراء الاختبار، افحى الجراب المعدني الرقيق ثم انزعي شريحة الاختبار. واستخدمي شريحة الاختبار على الفور. تجنبي الإفراط في تناول السوائل قبل إجراء الاختبار.
- مع ضبط اتجاه الطرف المندب للأسفل، قومي بإمسك أداة تجميع العينات الماصة في مجرى تدفق البول لمدة 3 - 7 ثوان فقط.
- وبعد مرور 7-3 ثوان، أبعدي أداة تجميع العينات الماصة عن مجرى تدفق البول. مع الإبقاء على توجيه شريحة الاختبار لأسفل، انزعي الغطاء عن المقيض ثم ضعيه على أداة تجميع العينات الماصة.

بدلاً من ذلك، يمكنك جمع عينة من البول في وعاء نظيف وجاف، ثم غس أنت جميع العينات الماصة في البول لمدة 15 ثانية فقط. ويتعين عليك اختبار البول على الفور.

3 قراءة الاختبار

- يمكن قراءة النتيجة في أي وقت بين 3 إلى 10 دقائق عقب إزالة أداة تجميع العينات الماصة من مجرى تدفق البول. إذا كان هناك خطان أزرقان في نافذة الاختبار، فهذا يعني أنك "حامل" (قد يكون أحد الخطين بلون أفتح أو أعمق من الآخر). الرجاء ملاحظة أنه يجب أن يكون كلا الخطين في نفس الاتجاه ولهما نفس العرض.
- إذا ظهر خط أزرق واحد فقط في نافذة الاختبار، فهذا يعني أنك "غير حامل".
- يجب قراءة النتيجة في غضون 10 دقائق. ويتم تجاهل أي تغييرات في النتيجة بعد هذا الوقت.
- إذا لم يكن هناك أي خطوط زرقاء في نافذة الاختبار، فهذا يعني أنه لم يتم إجراء الاختبار بشكل صحيح. وقد يرجع ذلك إلى استخدام كمية كبيرة جداً أو صغيرة جداً من البول. لذا، يتعين عليك إجراء الاختبار مرة أخرى باستخدام عينة بول كما هو مذكور أعلاه في قسم "إجراء الاختبار".
- إذا كنت غير متأكد من النتيجة أو إذا أشارت النتيجة إلى أنك "غير حامل" وما زال هناك شك في وجود حمل، يتعين عليك الانتظار لمدة 3 أيام على الأقل قبل إعادة إجراء الاختبار باستخدام اختبار جديد.

أسئلة وإجابات

1 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية على النتيجة؟

- اقربي دائماً تعليمات جهة التصنيع الخاصة بأي أدوية تتناولونها قبل إجراء الاختبار.
- يمكن أن تؤدي عقاقير الخصوبة التي تحتوي على هرمون HCG إلى نتائج مضللة (عادة ما يتم تناول عقاقير الخصوبة هذه عن طريق الحقن وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من تناولها إلى إعطاء نتيجة "حامل" زائفة).
- لا تؤثر الأدوية الخصوبة الأخرى (مثل الكلوميدين سترات) والمسكنات وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) على النتيجة.

2 ما الذي يتعين علي فعله في حالة حصولي على النتيجة "حامل"؟

- إذا كانت النتيجة "حامل"، فيتعين عليك استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن.

3 ما الذي يتعين علي فعله في حالة حصولي على النتيجة "غير حامل"؟

- إذا كان موعد بدء دورة الطمث لديك متأخراً، وكانت النتيجة "غير حامل"، فقومي بإجراء الاختبار مرة أخرى في خلال ثلاثة أيام. وإذا حصلت على النتيجة "غير حامل" مرة أخرى وما زالت دورتك لم تبدأ بعد، فاستشري الطبيب.

- إذا كنت قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقار هرموني لمنع الحمل أو إذا كنت تستخدمين الأدوية للخصوبة مثل الكلوميدين سترات، فقد تكون دورة الطمث لديك غير منتظمة، مما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.
- إذا كنت حاملاً مؤخراً (حتى لو لم يستمر الحمل لمدة كاملة) فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.
- يمكن أن يؤدي الحمل خارج الرحم والتكيس في المبايض وانقطاع الطمث وبعض الحالات الصحية النادرة جداً إلى نتائج مضللة.
- إذا حصلت على نتائج غير متوقعة، فلا بد من مناقشتها مع طبيبك.

www.clearblue.com

يتم التخزين في درجة حرارة الغرفة.
يتم حفظه بعيداً عن متناول الأطفال.
يتم التخلص منه مع مخلفات المنزل العادية.
تجنبني الاستخدام إذا كان الغلاف المعدني الرقيق تالفاً.
ولا تستخدمني شريحة اختبار تجاوزت تاريخ انتهاء صلاحيتها.
هذا الجهاز للاستخدام المنزلي.

وللاستخدام في التشخيص المعملي فقط. IVD

كل شريحة اختبار مخصصة للاستخدام مرة واحدة فقط.

IVD	جهاز طبي للتشخيص في الأيوب الاختبار	LOT	كود الدفعة	غير قابل لإعادة الاستخدام
مقاييس	مقاييس درجة الحرارة 2 درجة مقاييس 30 درجة مئوية.	مقاييس	الاستخدام بواسطة	جهة التصنيع

بسبب أهمية الرعاية قبل الولادة على صحة الطفل، نوصي باستشارة الطبيب قبل التفكير في الحمل.

لاستفسار عن المنتج، الرجاء الاتصال بدعم العملاء على العنوان التالي:-
جهة التصنيع، SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH,
Route de St Georges 47, 1213 Petit-Lancy, جنيف، سويسرا

صنع في الصين

© 2013 SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH. جميع الحقوق محفوظة.

Clearblue علامة تجارية.