

Clearblue™

2300539.02.06.2019

اختبار حمل اكتشاف مبكر رقمي

يُظهر النتيجة بعلمة + أو -

- دقة تزيد عن 99% بداية من يوم دورتك الشهرية المتوقعة.
- يمكن استخدامه قبل 5 أيام من دورتك الشهرية الفائتة.
- يرجى قراءة هذه النشرة بعناية قبل إجراء الاختبار.

1 قومي بإجراء الاختبار



- إذا كنت تجربين الاختبار بداية من اليوم المقرر لنزول دورتك الشهرية المتوقعة، فيمكنك إجراء الاختبار في أي وقت خلال اليوم. وإذا أجريت الاختبار قبل يوم الدورة الشهرية المتوقعة، فينبغي استخدام أول عينة من بول الصباح.
- عندما تكونين جاهزة لإجراء الاختبار، أخرجي عصا الاختبار من الغلاف المعدني الرقيق وانزعي الغطاء الأزرق. ثم استخدمي عصا الاختبار مباشرة.
 - خلال إجراء الاختبار، تجنبنا تمامًا توجيه طرف أداة التجميع إلى الأعلى أثناء الإمساك بعصا الاختبار.

تجمعي عينة من البول في وعاء نظيف جاف

أو

إما أن تجري الاختبار أثناء دفع البول



- ضعي طرف أداة التجميع فقط في البول مع توجيهه لأسفل، كما هو مبين في الشكل، لمدة 20 ثانية فقط.
- عليك الحفاظ على توجيه طرف أداة التجميع لأسفل أو وضع عصا الاختبار على سطح مستو حتى تظهر نتيجة الاختبار.
- يمكنك إعادة تركيب الغطاء في مكانه.



- ضعي طرف أداة التجميع فقط في مجرى البول لمدة 5 ثوانٍ، بحيث يكون متجهًا إلى الأسفل.
- احرصي على عدم تعرض بقية عصا الاختبار للبلل.
- عليك الحفاظ على توجيه طرف أداة التجميع لأسفل أو وضع عصا الاختبار على سطح مستو حتى تظهر نتيجة الاختبار.
- يمكنك إعادة تركيب الغطاء في مكانه.



2 انتظري ...

- سيومض رمز الانتظار ليوضح أن الاختبار قيد التنفيذ.
- عندما يتوقف رمز الانتظار عن الوميض، ستظهر نتيجة اختبارك. إذا لم يظهر رمز الانتظار بعد إجراء الاختبار، فارجعي إلى السؤال رقم 5 في قسم "الأسئلة والأجوبة" في ظهر الصفحة.



3 شاهدي نتيجتك

- في خلال 3 دقائق، ستعرض الشاشة نتيجة الاختبار. قد تظهر بعض النتائج في غضون وقت أقل قد يصل إلى دقيقة واحدة.
- ستبقى النتيجة على الشاشة لمدة 24 ساعة تقريبًا.

أخطاء الاختبار

- الرجاء قراءة قسم "أخطاء الاختبار" على ظهر الصفحة إذا استخدمت جهاز الاختبار وظهر الشاشة ما يلي:



إذا كانت نتيجتك "غير حامل"، فارجعي إلى السؤال رقم 8 في قسم الأسئلة والأجوبة.

إذا كانت نتيجتك "حامل"، فارجعي إلى السؤال رقم 7 في قسم الأسئلة والأجوبة.



خطأ بشاشة خالية

خطأ بصورة كتاب



- التخلص من اختبار الحمل الرقمي Clearblue™ للاكتشاف المبكر
- قبل التخلص من جهاز الاختبار، عليك إخراج البطارية من جهاز الاختبار. ضعي قطعة معدنية في الفتحة الموجودة في ظهر جهاز الاختبار. ثم أدبريها لفتح الدائرة البلاستيكية.
- أخرجي البطارية، ثم تخلصي منها وفقًا لإجراءات إعادة التدوير المناسبة. تنبيه: يحظر فك البطارية أو إعادة شحنها أو إلحاقها في النار، وكذلك يحظر بلعها. واحتفظي بها بعيدًا عن الأطفال.
- تخلصي من بقية جهاز الاختبار وفقًا لإجراءات إعادة التدوير المناسبة الخاصة بالأجهزة الكهربائية.
- لا تتخلصي من الأجهزة الكهربائية بلقائها في النار.

الأسنلة والأجوبة

- 1 ما مدى دقة Clearblue™؟
لقد تمتعت الاختبار بنسبية دقة تتعدى 99% خلال الاختبارات العملية، وذلك عند استخدامه بدءاً من يوم الدورة الشهرية المتوقعة.
- 2 كيف يعمل Clearblue™؟
عندما تكونين حاملاً ينتج جسمك هرمون الحمل hCG (موجبة عند التغد التفاضلية المشيمائية البشرية). حيث يزيد مقدار هرمون hCG في جسمك في فترات الحمل الأولى. ويستطيع هذا الاختبار اكتشاف الكميات الضئيلة من هذا الهرمون في البول.
- 3 متى يمكنني إجراء الاختبار باستخدام Clearblue™ للاكتشاف المبكر الرقعي؟
يزداد هرمون الحمل بسرعة في بداية فترة الحمل، ويمكن استخدام هذا الاختبار قبل الدورة الشهرية الفائتة بفترة تصل إلى 5 أيام (أي قبل 4 أيام من الدورة الشهرية المتوقعة). إذا أجريت الاختبار قبل الموعد المتوقع للدورة وحصلت على النتيجة "غير حامل" فلا تزال هناك فرصة في أن تكوني حاملاً. شاهدني الرسم البياني المبين للأسفل للاطلاع على نتائج الاختبارات السريعة التي أجريت باستخدام عينات الحمل المبكرة:

| إجراء الاختبار مبكراً | عدد الأيام قبل الدورة الشهرية المتوقعة | % من العينات المأخوذة من السيدات الحوامل تعطي النتيجة "حامل" |
|-----------------------|--|--|
| 1- | -1 | 95% |
| 2- | -2 | 90% |
| 3- | -3 | 82% |
| 4- | -4 | 51% |

- لحساب اليوم المتوقع للدورة الشهرية، احسبي مدة الدورة الشهرية العادية بحساب عدد الأيام بدءاً من اليوم الأول لنزول الدورة حتى اليوم السابق لبداية الدورة التالية.
- إذا كنت تمرين بدورات غير منتظمة، فلابد أن تعطي وقتاً بمقدار أطول دورة لك في الأشهر الأخيرة قبل إجراء الاختبار.
- إذا كنت تتويين إجراء الاختبار بدءاً من اليوم المتوقع لنزول الدورة الشهرية، فيمكنك القيام بذلك في أي وقت خلال اليوم. أما عند إجراء الاختبار قبل اليوم المتوقع لنزول

- الدورة الشهرية، استخدمي عينة من بول الصباح. تجنبي الإفراط في تناول السوائل قبل إجراء الاختبار.
- إذا كانت النتيجة "غير حامل" ولا يزال هناك شك في حدوث الحمل، فارجعي إلى السؤال رقم 8.
- 4 هل يمكن أن تؤثر أي أدوية أو ظروف صحية على النتيجة؟
• احرصي دائماً على قراءة تعليمات الجهة المصنعة لأي دواء تتناولينه قبل إجراء أحد الاختبارات.
- يمكن أن تؤدي عقاقير الخصوبة التي تحتوي على هرمون hCG إلى إظهار نتائج مضللة (تؤخذ عقاقير الخصوبة عادة بالحقن، وقد يؤدي إجراء الاختبار بعد وقت قصير جداً من تناولها إلى إعطاء نتيجة "حامل" زائفة.
- لا تؤثر أدوية الخصوبة الأخرى (مثل الكلوميدين سترات والمسكنات) وعقاقير منع الحمل الهرمونية (مثل أقراص منع الحمل) على النتيجة.
- إذا كنت قد توقفت مؤخراً عن استخدام عقار هرموني مانع للحمل أو كنت تستخدمين أدوية الخصوبة مثل الكلوميدين سترات، فقد تصبح الدورة الشهرية غير منتظمة ما يؤدي إلى إجراء الاختبار في وقت مبكر جداً.

إذا كنت حاملاً مؤخراً (حتى لو لم يكتمل الحمل) فقد تحصلين على نتيجة "حامل" زائفة.

يمكن أن يشيبد الحمل خارج الرحم وتكيس المبيض وبلوغ سن انقطاع الطمث وبعض الأمراض النادرة الأخرى في إظهار نتائج مضللة.

إذا ظهرت لك النتيجة "حامل" فمن المحتمل أن تكشفني لاحقاً أنك لست حاملاً بسبب حدوث فقدان طبيعي للحمل، والذي يمكن أن يحدث في المراحل الأولى للحمل.

إذا حصلت على نتائج غير متوقعة، فيمكن عليك مناقشتها مع الطبيب.

5 لقد أجريت الاختبار ولكن لم يظهر رمز الانتظار. ماذا يعني ذلك؟
لم يتم إجراء الاختبار بصورة صحيحة. الرجاء مراجعة قسم "الأخطاء الاختبار" فيما يلي.

6 لقد أجريت الاختبار ولكن لم تظهر أي نتيجة على الشاشة. ماذا يعني ذلك؟
يجب أن تظهر نتيجة الاختبار على الشاشة خلال 3 دقائق.

فيذا لم تظهر أي نتيجة، فالرجاء مراجعة قسم "أخطاء الاختبار" فيما يلي.

7 نتيجة اختبائي تشير إلى أنني حامل. ماذا ينبغي أن أفعل؟
إذا كانت نتيجة الاختبار "حامل"، فيمكن عليك زيارة الطبيب، حيث سيقدّم لك إرشادات بخصوص الخطوات اللاحقة.

8 نتيجة اختبائي تشير إلى أنني لست حاملاً. ماذا ينبغي أن أفعل؟
قد لا تكونين حاملاً، أو قد لا يكون مستوى هرمون الحمل مرتفعاً بما يكفي لاكتشافه، أو قد تكونين قد أحطبت في حساب اليوم المتوقع للدورة الشهرية.

• إذا أجريت الاختبار مبكراً، فأجري الاختبار مرة أخرى في اليوم المتوقع للدورة الشهرية.

• إذا تأخرت دورتك الشهرية عن مواعدها المتوقع، فيمكنك إعادة إجراء الاختبار خلال 3 أيام. إذا أعطاك هذا الاختبار النتيجة "غير حامل"، ولم تنزل الدورة الشهرية، فينبغي استشارة الطبيب.

أخطاء الاختبار

خطأ بصورة كتاب - يشير إلى وقوع خطأ أثناء إجراء الاختبار. قد يتمثل في:

- لم تكن طرف أداة التجميع متجهياً لأسفل أو أن جهاز الاختبار لم يكن موضوعاً بشكل متساوٍ بعد وضع البول.
- تم وضع كثير جداً أو قليل جداً من البول.
- ينبغي إجراء الاختبار مجدداً، مع الحرص على اتباع التعليمات.

خطأ بشاشة خالية - يشير إلى عدم إجراء الاختبار بالصورة المتوقعة.

قد يحدث هذا بسبب عدم اتباع تعليمات الاستخدام. قد تحتاجين إلى إجراء اختبار آخر. يرجى اتباع تعليمات الاستشارة بعناية.



اختبار ذاتي للاستخدام المنزلي.
لا تستخدم للتشخيص في المختبر.
غير مخصص للاستخدام الداخلي.
يحظر إعادة الاستخدام.

مخصص للاستخدام مرة واحدة.
حافظي على الاختبار بعيداً عن متناول الأطفال.

يُخزن في درجة حرارة تتراوح بين 2 - 30 درجة مئوية.

يُترك لمدة 30 دقيقة حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة قبل إجراء الاختبار حال حفظه في التلاجة.

لا تستخدميه إذا كان الغلاف المعدني الرقيق الحافظ تالفاً.

لا يستخدم بعد انتهاء تاريخ "الصلاحية".
يجتني هذا المنتج على بطاريات.

يتم التخلص منه وفقاً للوائح المحلية.

يلبي هذا الجهاز الرقمي الخاص بالتحليل الذاتي (IVD) متطلبات الامتثال الخاصة بمعيار EN 61326-2-6:2006. وستوفر تنابير التوافق الكهرومغناطيسي (EMC) المضادة المستخدمة في الأداة الإلكترونية حماية معزولة من آثار التداخل الكهرومغناطيسي التي يُحتمل وجودها في البيئة المنزلية. تتطابق التحذيرات الوقائية التالية على المععدات المتوافقة مع المعيار EN 61326-2-6:2006.

أ) قد يؤدي استخدام هذا الجهاز في بيئة جافة، وخصوصاً في حالة وجود مواد صناعية (ملايش صناعية، سجاد، إلخ) إلى حدوث تفرغ عند الشحنات الساكنة، مما قد يؤدي إلى إظهار نتائج خاطئة.
ب) لا تستخدم هذا الجهاز بالقرب من مصادر الإشعاع الكهرومغناطيسي القوي (مثل الهواتف المحمولة)، لأنها قد تتعارض مع عمل الجهاز على نحو سليم.

www.clearblue.com

لا استنصرام لمنتج، الرجاء الاتصال بدعم العملاء على العنوان التالي:-

حامل ترخيص التسويق

SPD Swiss Precision Diagnostics GmbH (SPD),

1213, Route de St Georges 47,

موقع التصنيع: Clearblue Diagnostics Co

Alere (Shanghai) Route Co. شركة ذات مسؤولية محدودة. شنهجاي، الصين.

Clearblue هي علامة تجارية لشركة SPD.

© 2019 SPD. جميع الحقوق محفوظة.

| LOT | كود الدفعة | IVD | جهاز طبي للتشخيص في المختبر | الجهة المصنعة |
|-----|---------------------|-----|--|----------------------|
| Ⓛ | الاستخدام قبل تاريخ | CE | الحد المسموح به لدرجة الحرارة 2 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية | تحظر إعادة الاستخدام |